


GHID DE PRELEVARE

Conținutul pachetului

- Tub de recoltare care conține un lichid stabilizator pentru păstrarea probei de scaun în siguranță pe durata transportului
- Tampon steril pentru prelevare = băț de prelevare
- Suport de colectare biodegradabil pentru scaun care poate fi aruncat în toaletă după prelevare
- Prezentul ghid de prelevare a probei
- Plic de returnare (transportul este inclus în prețul analizei)


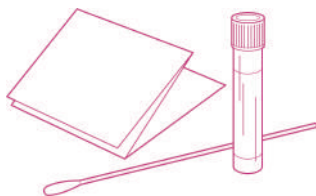


Informații importante

- Testul se efectuează la 4 săptămâni după întreruperea administrării de antibiotice.
- Se recomandă golirea vezicii urinare înainte de defecare, pentru a evita eliminarea urinei în recipientul de recoltare.
- Analiza nu poate fi efectuată dacă pătrunde apă în recipient sau dacă soluția conservantă se varsă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECOLTARE

1. Înainte de prelevare, spălați-vă pe mâini.
2. Scoateți tubul de recoltare din ambalaj și așezați-l la îndemână, în apropierea toaletei.
3. Fixați suportul de colectare a scaunului pe colacul vasului de toaletă. Așezați-vă astfel încât scaunul să cadă direct în suport.

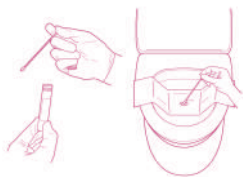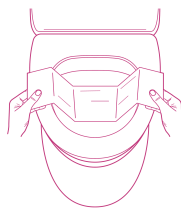

4. Desurubați capacul tubului și, cu ajutorul bețișorului de prelevare, prelevați o cantitate mică de scaun dintr-o singură zonă.



microbiom
CENTER




5. Introduceți bețișorul în tub și amestecați timp de 30 de secunde, astfel încât scaunul să se dizolve în lichid și bacteriile să treacă în soluția din recipient.



6. Rupeți bețișorul în interiorul tubului, la punctul de rupere prestabilit. Înșurubați bine capacul tubului (bețișorul rămâne în interior).

7. Puneți tubul în plicul de returnare preplătit.

8. Pentru preluarea probei recoltate, contactați-ne prin e-mail sau prin telefon.

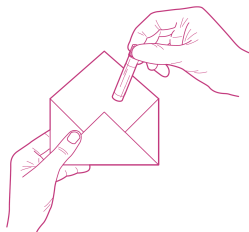

9. Pentru a activa proba, vă rugăm să accesați platforma prin codul QR și să introduceți codul Dvs. de activare format din 12 cifre.

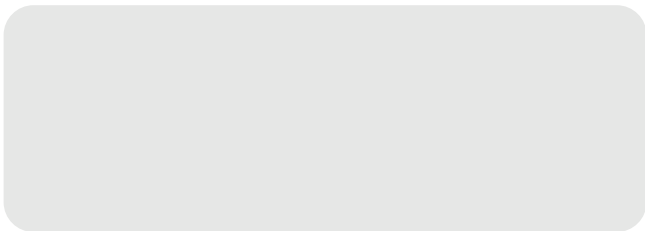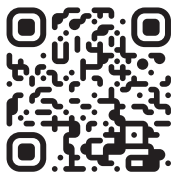

CE ESTE TESTUL GENOMIC DIN SCAUN?

Testul genomic din scaun este o metodă avansată de evaluare a florei intestinale, care analizează întreaga comunitate microbiană din intestin și oferă o perspectivă detaliată asupra compoziției microbiomului intestinal. Este esențial în explorarea florei microbiene intestinale și în stabilirea raportului dintre bacteriile benefice și cele patogene, prezentând diversitatea și calitatea microbiomului. Totodată, permite identificarea unor posibile dezechilibre sau a prezenței unor bacterii patogene ce pot fi asociate cu riscuri semnificative pentru anumite boli cronice.

Prin utilizarea tehnologiei moderne de secvențiere ADN de ultimă generație (NGS), testul oferă o analiză aprofundată și personalizată a microbiomului. Acesta poate fi considerat amprenta florei intestinale, având în vedere unicitatea și variabilitatea florei fiecărei persoane. Microbiomul intestinal reprezintă ansamblul de bacterii și alte microorganisme care trăiesc în intestin, jucând un rol esențial în menținerea sănătății, inclusiv în procesele digestive, funcția imunitară și reglarea metabolismului.